



Twinky Star®

ЦВЕТНОЙ СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ КОМПОМЕРНЫЙ
ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ БЛЕСТОК



Twinky Star®

ЦВЕТНОЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ БЛЕСТОК ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ

Здоровые молочные зубы обеспечивают, прежде всего, жевательную функцию у растущего ребенка. Кроме того, зубы первой смены чрезвычайно важны для развития и формирования речи, они сохраняют место для постоянных зубов, обеспечивают развитие жевательной функции и постепенный нормальный скелетный рост челюстно-лицевой области. Поэтому, наряду с редукцией активности кариеса путем проведения разъяснительных бесед с родителями и назначения подходящих профилактических мероприятий, нужно обеспечить адекватное стоматологическое лечение уже пораженного кариесом зуба или группы зубов. При этом маленький пациент часто является самым настоящим испытанием для Вас и Ваших сотрудников. Помимо большого запаса терпения требуется еще и такой материал, который бы поддерживал Вас при проведении лечения, и дополнительно способствовал положительной комплаентности со стороны пациента и родителей.

Маленький пациент – настоящее испытание

При лечении детей Вы часто сталкиваетесь с их страхом, нервозностью, нетерпеливостью и недоверием. Но, несмотря на это Вы нашли собственный метод обхода таких стесовых ситуаций, которые могут создать значительные трудности в Вашей работе. Важной предпосылкой для успешного лечения детей также является удачный выбор пломбировочного материала.

Твинки Стар – цветной компомер с эффектом блесков

Твинки Стар, цветной пломбировочный материал с эффектом блесков, разработан специально для детей. Демонстрируя разные цвета для будущей пломбы Вы, тем самым, можете вовлечь маленького пациента в процесс лечения. При выборе цвета пломбы у ребенка появляется ощущение собственного влияния на лечение. Вследствие этого, страх и нетерпение отходят на задний план и процесс лечения протекает без

особого стресса, что оказывает благоприятный эффект на комплаентность ребенка. Кроме того, у маленьких пациентов развивается продолжительный интерес к состоянию и уходу за своими зубами, поскольку новые цветные пломбы как можно дольше должны оставаться «красивыми» (Д-р Шефер, Кристина; ЗМК Стоматология, менеджмент и культура, вып. 12/2004; стр. 866-868). И это, в итоге, оказывает благотворное влияние на состояние молочного прикуса в целом.

Зарекомендовавшая себя технология компании VOCO

По результатам независимого опроса американских стоматологов о клинической пользе Твинки Стар, наиболее часто упоминаемое свойство Твинки Стар - его позитивное восприятие детьми и удачный ассортимент оттенков с соответствующими цветными образцами. Кроме того, стоматологи подчеркнули хорошую консистенцию и хорошие технологические свойства Твинки Стар.

Чтобы порадовать мальчиков и девочек их любимыми цветами, Твинки Стар предлагает следующую палитру оттенков:



Технические характеристики

Устойчивость на изгиб	116 МПа
Содержание наполнителя	77,8 вес.-%
Абразия	15,4 мкм
Прочность на сжатие	316 МПа
Адгезия к эмали / дентину	27,3 / 24,1 МПа
Полируемость	очень хорошая
Рентгеноконтрастность	220 %Al
Устойчивость оттенка	отсутствие обесцвечивания
Низкая полимеризационная усадка	2,0 об.-%

Продукт Твинки Стар был разработан на основе зарекомендовавшей себя компомерной технологии VOCO.

Компомеры прекрасно подходят для пломбирования зубов у детей. Наряду с такими хорошими физическими характеристиками, как например, низкая абразия, они также отличаются высокой биосовместимостью, хорошей адгезией и краевой адаптацией, а также дополнительным выделением фторида. Пломба является не только цветной, но и надежной и долговечной.

Быстрое лечение – Твинки Стар и Футурабонд У

Поскольку в роли пациентов дети выдерживают постороннее вмешательство лишь на протяжении очень короткого времени,

стоматологическое лечение нужно успеть провести за короткий промежуток времени. Благодаря Футурабонд У, универсальному бонду компании VOCO, и Твинки Стар возможно быстрое выполнение работы. Этот адгезив, применяемый в любой технике протравливания, является быстрым и простым в использовании. Расход времени при этом составляет всего **35 секунд**. В кондиционировании твёрдых тканей нет необходимости.


Даже в трудных условиях при использовании Футурабонд У можно достичь хороших результатов лечения. Нанесение материала из унидоз дополнительно сокращает время работы.

Штопфируемый или текучий – капсула или дозатор

Штопфируемый Твинки Стар выпускается в восьми привлекательных эффектных оттенках и поставляется в практичных капсулах. Благодаря этой системе Вы можете быстро вносить пломбировочный материал прямо в полость.

Твинки Стар Флоу выпускается в синем и розовом оттенках для тех, кто предпочитает использование этого цветного пломбировочного материала в практичном NDT®-дозаторе. Текучий пломбировочный материал обеспечивает очень хорошее смачивание дна и стенок полости, гарантируя тем самым высокое качество пломбирования даже в сложных клинических ситуациях.

Пломба из компомера – альтернатива в детской стоматологии

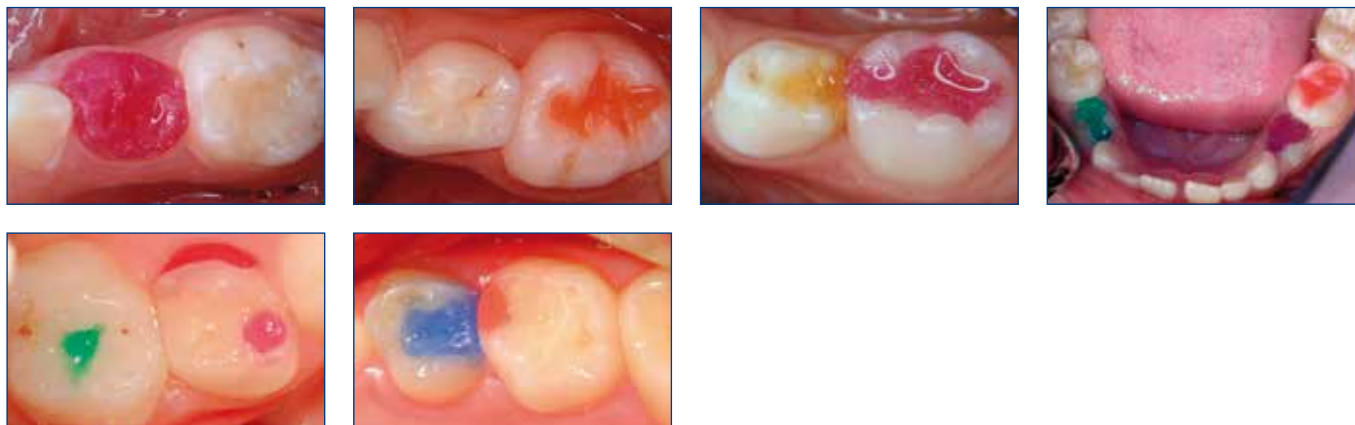

Twinky Star®

ЦВЕТНОЙ СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ КОМПОМЕРНЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ С ЭФФЕКТОМ БЛЕСТОК

Показания

Пломбирование молочных зубов

Преимущества

- Восемь ярких, блестящих, эффектных оттенков
- Быстрое и простое внесение из капсул
- Отличная полируемость
- Материал создан на основе проверенной компомерной технологии VOCO
- Система расцветки из оригинальных оттенков
- Родителям легче мотивировать детей посетить стоматолога
- Дети избавляются от страха перед лечением
- Рекламный материал для соответствующих целевых групп пациентов



Формы выпуска

Твинки Стар

- REF 1680 Комплект: 40 Капс по 0,25 г (5 × на оттенок), система расцветки
- REF 1689 Система расцветки
- REF 9301 Капс Диспенсер

Твинки Стар Флоу

- REF 2144 Аппликационные канюли тип 44, 100 штук

Оттенок	Капс 25 × 0,25 г	Оттенок	Капс 25 × 0,25 г
Золотой	REF 1681	Зеленый	REF 1685
Серебряный	REF 1682	Оранжевый	REF 1686
Синий	REF 1683	Лимонный	REF 1687
Розовый	REF 1684	Ежевичный	REF 1688

Оттенок	Дозатор 2 г
Синий	REF 1693
Розовый	REF 1694

VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven
 Германия
 Tel.: +49 (0) 4721-719-0
 Fax: +49 (0) 4721-719-140
 info@voco.com
 www.voco.dental

Представлено:

