


# Kerr™

## Профессиональная гигиена и профилактика

### Пасты и аксессуары для процедуры профессиональной чистки



Cleanic® Light

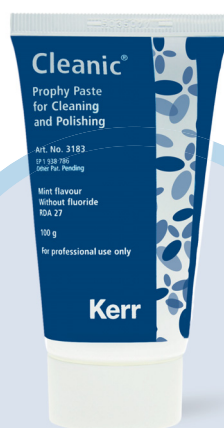

Cleanic® Mint  
Fluoride-Free



Аксессуары



Cleanic®



Pro-Cup®


# Чистящие и полирующие пасты

## Cleanic® – паста для профессиональной гигиенической чистки


Cleanic® – универсальная паста для чистки и полировки, имеющая изменяемую абразивность.

Содержание перлита, относящегося к группе вулканических риолитов или кварцевых порфировых стекол, делает профилактическую пасту Cleanic® уникальной.

Высокоэффективная и в то же время щадящая структуру зуба, с низким значением RDA – всего 27, паста Cleanic® обеспечивает объединенное переменное действие чистки и полировки: в первые несколько секунд применения (около 7 сек.) паста проявляет максимальный очищающий эффект. Преобразование крупнозернистых частиц перлита в мелкозернистые и сглаживание их краев за 15 сек. превращает Cleanic® в полирующую пасту с сильным эффектом придания блеска.

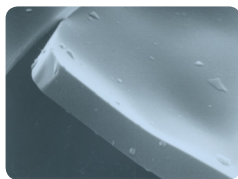

Частицы перлита до начала чистки

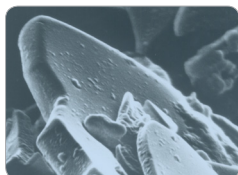

Частицы перлита после 15 сек. чистки



Мятный вкус

Вкус зеленого яблока (без ментола)




До чистки с Cleanic®



После чистки с Cleanic®

Клинический случай предоставлен доктором О. Мельниковой

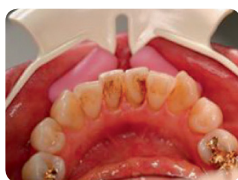

До чистки с Cleanic®



Чистка с помощью пасты Cleanic®, чашечек Pro-Cup® и ретрактора OptiView™



После чистки с Cleanic®

Клинический случай предоставлен доктором Арне Лундом

## Особенности и преимущества Cleanic®

- Экономия времени и простота использования благодаря использованию одной пасты для чистки и полировки: очистка поверхности в течение первых 7 сек. и последующая полировка до блеска (еще 8 сек.).
- Эффективная полировка поверхности зуба и снижение скорости появления нового налета.
- Высокая эффективность при низкой абразивности (RDA 27).
- Полирование и сглаживание зубной эмали без ее повреждения благодаря низкой абразивности.
- Возможность выбора вкуса (мятный, яблочный), что особенно важно на детском приеме.
- Наличие пасты без вкуса и искусственных красителей для пациентов с аллергией.
- Наличие паст с фторидом и без него. Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия (кроме Cleanic® Mint Fluoride-Free и Cleanic® без фтора в картриджах).
- Удобство проведения чистки при использовании специальных колец.
- Экономичность использования пасты в тубе (100 г).
- Экономичное расходование пасты вместе с чашечками Pro-Cup®.
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex® или AirFlow®).
- При наличии эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта возможно применение пасты со вкусом зеленого яблока благодаря отсутствию в ней ментола.

## Cleanic® Mint Fluoride-Free

Паста Cleanic® Mint Fluoride-Free не содержит фторид и прекрасно подходит для проведения общей профилактической чистки, непосредственно предшествующей процедуре реставрации, а также ортодонтическим процедурам (в отличие от паст, содержащих фторид, использование которых может негативно сказаться на качестве реставрации из-за химической реакции с адгезивами).

Cleanic® Mint Fluoride-Free также подходит пациентам, страдающим флюорозом.



## Cleanic® Light

- Решение для пациентов с аллергией.
- Без красителей.
- Без вкусовых добавок.



## Информация для заказа

### Cleanic® в тубе

Туба пасты Cleanic® с мятым вкусом с фтором (100 г)	3180
Туба пасты Cleanic® со вкусом зеленого яблока с фтором (100 г)	3182
Туба пасты Cleanic® Mint Fluoride-Free с мятым вкусом без фтора (100 г)	3183
Туба пасты Cleanic® Light без вкуса и искусственных красителей (100 г)	3184

### Унидозы Cleanic® с фтором

200 унидоз по 2 г, 3 чашечки.	3140
Содержание фторида натрия (NaF) – 0,10%	

### Упаковки Cleanic®

Картридж пасты Cleanic® с фтором (200 г), 8 клипс Prophyl, 3 шпателя	3100
Картридж пасты Cleanic® без фтора (200 г), 8 клипс Prophyl, 3 шпателя	3200
Картридж пасты Cleanic® с фтором (100 г)	3110
Картридж пасты Cleanic® без фтора (100 г)	3210
Тест-упаковка пасты Cleanic® с фтором (100 г)	3130
Тест-упаковка пасты Cleanic® без фтора (100 г)	3230

## CleanPolish и SuperPolish

### Пасты для чистки зубов перед реставрацией и для полировки реставрации – традиционная двухшаговая система паст без фтора

**Первый шаг – CleanPolish:** паста, которая быстро и эффективно очищает как естественные ткани зубов, так и реставрации из композитов и металлов. На основе пемзы (более абразивная, нежели Cleanic®). RDA: 43.8 – REA 5.5

**Второй шаг – SuperPolish:** придает зеркальный блеск как естественным тканям зубов, так и реставрациям из композитов и металлов.

Не содержит пемзу. RDA: 9.8 – REA: 4.5

### Особенности и преимущества CleanPolish и SuperPolish

- Эффективная очистка естественных тканей зубов, композитных и металлических реставраций и успешное применение для полировки реставраций.
- Более высокая абразивность чистящей пасты (по сравнению с пастой Cleanic®) и более быстрое достижение видимых результатов чистки.
- Традиционная двухшаговая система, не требующая обучения применению.
- Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии) благодаря отсутствию фторидов.
- Экономичная система.

## Информация для заказа

### CleanPolish и SuperPolish

Туба пасты CleanPolish без фтора и анисовой отдушки (50 г)	360
Туба пасты SuperPolish без фтора и анисовой отдушки (45 г)	361
1 CleanPolish 50 г (арт. 360), 1 SuperPolish 45 г (арт. 361), 20 щеточек из натуральных волокон (арт. 831 RA)	831 CLID
1 CleanPolish 50 г (арт. 360), 1 SuperPolish 45 г (арт. 361), 20 щеточек из нейлоновых волокон (арт. 835 RA)	835 CLID



CleanPolish (360)



SuperPolish (361)

## Роторасширитель OptiView™

### Особенности и преимущества OptiView™

- Хорошая ретракция и оптимальный доступ к операционному полю благодаря одновременной фиксации щек и губ.
- Широкий спектр применения: при фронтальных реставрациях, отбеливании, ортодонтическом, хирургическом и ортопедическом лечении.
- Многоразовое использование благодаря возможности автоклавирувания.
- Максимальный комфорт для пациента благодаря анатомической форме, прорезям для уздечек верхней и нижней губ и мягким подушечкам, не давящим на переходную складку.
- Отсутствие талька и возможность применения при хирургических вмешательствах.
- Простота и легкость установки и извлечения.
- Успешное применение на детском приеме. Доступность в двух размерах – в стандартном (белом) и маленьком (голубом).



OptiView™ (5500)



OptiView™ (5502)

## Информация для заказа

### Набор OptiView™ стандартного размера

2 держателя для губ и щек с подушками для губ	5500
-----------------------------------------------	------

### Набор OptiView™ маленького размера

2 держателя для губ и щек с подушками для губ	5502
-----------------------------------------------	------

# Аксессуары для чистки и полировки

## Pro-Cup® и Pro-Cup® Junior

### Чашечки для чистки и полировки

Безлатексные резиновые чашечки Pro-Cup® обеспечивают эффективную очистку поверхности зуба и экономичное использование профилактической пасты без разбрызгивания. Благодаря свойствам материала с низким коэффициентом трения не происходит перегрева тканей зуба.

Мягкие (голубые) и жесткие (темно-синие) чашечки Pro-Cup® – одноразовые и позволяют избежать перекрестного заражения и повторной обработки.

Чашечки Pro-Cup® Junior рекомендованы для профилактической чистки у детей и в ситуациях, когда доступ к ротовой полости ограничен.

Различные варианты выпуска облегчают выбор оптимального инструмента для чистки и полировки в зависимости от клинической ситуации и предпочтений стоматолога.



Фотография предоставлена доктором О. Мельниковой

## Особенности и преимущества Pro-Cup® и Pro-Cup® Junior

- Экономичность нанесения пасты.
- Наличие 2 вариантов – жесткие (синего цвета) и мягкие (голубого цвета) чашечки.
- Возможность использования при проведении чистки у пациентов с очень чувствительными деснами и тонкой эмалью более мягкими чашечками голубого цвета.
- Щадящая чистка в области десны и межзубных промежутков без травмирования десны.
- Меньшая болезненность процедуры чистки для пациента благодаря снижению нагревания зуба.
- Возможность использования для пациентов с аллергией на латекс.
- Защита роторной группы.
- Аккуратность проведения процедуры благодаря нанесению пасты без разбрызгивания.
- Возможность применения на детском приеме благодаря небольшим размерам чашечек Pro-Cup® Junior.
- Отличное удаление налета и налета Присти у детей.

## Информация для заказа

Жесткость и цвет чашечки	Количество в упаковке, шт.	Pro-Cup®		Pro-Cup® Junior	
		Screw-Type	Latch-Type	Screw-Type	Latch-Type
Мягкие голубые	30	1810/30	990/30	1812/30	992/30
	120	1810/120	990/120	1812/120	992/120
Жесткие темно-синие	30	1811/30	991/30	1813/30	993/30
	120	1811/120	991/120	–	993/120

## Миниатюрные чистящие и полирующие щеточки

### Hawe Miniature

Щеточки Hawe Miniature – самые миниатюрные щеточки для чистки и полировки, являющиеся абсолютным лидером по качеству и исполнению.



Натуральная щетина



Нейлоновая щетина

### Информация для заказа Hawe Miniature

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 10 шт.	831 RA
Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 100 шт.	831/100
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 10 шт.	835 RA
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 100 шт.	835/100

### Pro-Brush

Pro-Brush – миниатюрная одноразовая щеточка для чистки и полировки, легко узнаваемая по голубой полимерной чашечке, которая предотвращает появление царапин на поверхности реставрации при случайном соприкосновении.



Натуральная щетина



Нейлоновая щетина

### Информация для заказа Pro-Brush

Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 10 шт.	841 RA
Щеточки из натуральной щетины для углового наконечника, 100 шт.	841/100
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 10 шт.	845 RA
Щеточки из нейлоновой щетины для углового наконечника, 100 шт.	845/100

**Kerr™**

125993, г. Москва,  
Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9  
Бизнес-центр «Аэростар»  
Телефон +7 (495) 664-75-35  
Факс +7 (495) 664-75-35

195112, г. Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В  
Бизнес-центр  
«Санкт-Петербург Плаза»  
Телефон +7 (812) 331-86-96  
Факс +7 (812) 251-06-55

www.kerrdental.ru  
info.russia@kerrhawe.com

Список официальных дистрибьюторов представлен на сайте.